

Merkblatt zur Entnahme von Tupferproben aus dem Rachen und der Kloake von Wildvögeln

1. Verpackung des Entnahmebestecks am grünen Pfeil öffnen und ca. zur Hälfte aufreißen. Den weißen Verschluss des Röhrchens entfernen. Das Wattestäbchen an der grünen Halterung entnehmen.
2. Mit dem Wattestäbchen nach Öffnen des Schnabels den Rachenbereich unter drehenden Bewegungen abstreichen. Anschließend bei toten Tieren mit einer Hand die Federn im Kloakenbereich zur Seite schieben und mit der anderen Hand dasselbe Wattestäbchen unter drehenden Bewegungen ca. 2cm in die Kloake einführen.
3. Mit dem Wattestäbchen die Schleimhaut des Enddarms/der Kloake durch eine kreisförmige Bewegung abstreichen. Das Stäbchen aus der Kloake herausnehmen.
4. Das Wattestäbchen ohne vorher etwas anderes zu berühren in das Röhrchen bis zum Anschlag einführen. Die grüne Kappe fest aufdrücken.
5. Die weiche Spitze des Probenröhrchens mehrmals zusammendrücken, damit der Wattetupfer mit der geleeartigen Masse befeuchtet wird.
6. Röhrchen beschriften.

Probenbegleitschein ausfüllen und zusammen mit den Tupferproben noch am gleichen Tag gekühlt an die Untersuchungseinrichtung schicken!

Falls dies nicht möglich ist, die Proben über Nacht im Kühlschrank aufbewahren und am nächsten Morgen gekühlt in die Post geben!